



ORTHOFORMA

*Инструкция по использованию матраса
М 0002, М 0003, М 0021, М 0022*

**Матрас
противопролежневый
«Orthoforma»
с компрессором
«Orthoforma»**

- ✓ препятствует застою крови и лимфы в тканях, обеспечивает их нормальное питание и дыхание
- ✓ предотвращает образование пролежней, сглаживая неровности спального места
- ✓ обеспечивает массажный эффект за счет попеременного надувания соседних секций

Импортер/Продавец: ООО «ПРОТ»,
Россия, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 21, лит. А, пом. 27-Н,
тел.: (812) 740-70-68, факс: (812) 740-70-66;
www.atletika.ru, info@atletika.ru




НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Пролежни являются серьезной проблемой для прикованных к постели пациентов, особенно для тех, кто не может поворачиваться. Из-за долгого контакта с поверхностью кровати, кожа начинает воспаляться и этот процесс развивается. Язва причиняет серьезную боль пациенту помимо основного заболевания, таким образом, уход за пациентом становится намного тяжелее.

Стандартный массажный матрац для профилактики пролежней несет в себе предохранительную функцию. Его основная цель - уменьшить давление тела на кровать. Массажная система состоит из воздушных подушек. Они поочередно накачиваются, образуя 2 группы **A** и **B**, и, соответственно, меняют точки давления тела.

Рисунок 1

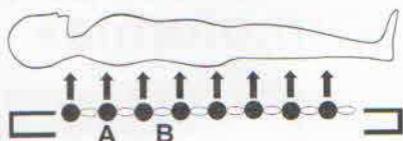

*Группа A наполнена воздухом,
в это время группа B - пустая*

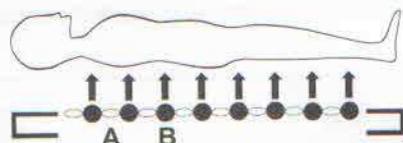

*Группа B наполнена воздухом,
в это время группа A - пустая*

ИНСТРУКЦИЯ

1. Установите компрессор на ровное место у ног больного или подвесьте за крюк.
2. Положите противопролежневый матрац на постель.
3. Соедините насос и матрац входящими в комплект трубками.
4. Подготовьте кровать ко сну, как вы делаете обычно, накройте матрац простыней большего размера. Не используйте булавки, так как они могут проткнуть поверхность воздушной подушки. **ВНИМАНИЕ:** проверьте трубки, убедитесь, что поток воздуха поступает непрерывно.
5. Матрац должен лежать вверх стороной наполненной воздухом. По всей поверхности матраца имеет микроотверстия (только для моделей M 0021 и M 0022), выполненные лазером, предназначенные для вентиляции, охлаждения и подсушивания тела пациента. Вентиляция не будет работать эффективно, если матрац расположен микроотверстиями к основанию кровати.
6. Для использования матраца в постели, сделанной из жестких материалов, необходимо подстелить под него легкое одеяло.
7. Установите выключатель давления на компрессоре до максимума (кроме модели M 0002). Включите вилку в розетку. Включите компрессор. Зеленая лампочка будет гореть, пока прибор находится во включенном состоянии.
8. Отрегулируйте переключатель давления (кроме модели M 0002). Регулируйте мощность работы компрессора в соответствии с весом пациента.

вес	мощность компрессора
менее 50 кг	1-3
от 50 до 55 кг	4-5
от 56 до 65 кг	6-8
от 66 до 80 кг	9
свыше 81 кг	10

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Типы поломок	Проблемы	Методы починки
Матрас не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка Присоединить ее
	Индикатор выключен	Матрас проколот Заклейте дыру
Матрас надувается не полностью	Индикатор выключен	Не подключено питание Подключите питание
	Матрас очень мягкий	Перегорел предохранитель Замените его
Матрас надувается не полностью	Матрас очень мягкий	Давление минимально Поверните диск направо
	Матрас трещит	Разверните его и вымойте

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убирать изделие на хранение:

1. Включите компрессор и проверьте поток воздуха (воздух должен выходить из трубок попеременно каждые 5-6 минут).
2. Проверьте трубки для воздуха на наличие повреждений.
3. Если изделие функционирует нормально, сверните трубки свободно (чтобы они не согнулись и не повредились) и храните вместе с изделием в полиэтиленовом пакете, чтобы защитить от влаги и пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не использовать в присутствии тлеющего или открытого огня!
Прежде, чем перемещать или ремонтировать насос, отключите его от сети!

1. Матрас должен находиться на сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды.
2. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.
3. Перед тем, как мыть матрас, его необходимо надуть. Дезинфицирующее средство не должно содержать красители. Пожалуйста, используйте в качестве антисептика 75% спирт.

ГАРАНТИЯ

При правильном использовании предоставляется гарантия (с даты продажи) на:

- компрессор – 12 месяцев;
- воздушную подушку с ячейками – 6 месяцев;
- воздушную подушку баллонного типа – 6 месяцев.

Внимание! Гарантия действует только при полностью правильно заполненном гарантийном талоне

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Матрас воздушный – 1 шт.
2. Компрессор – 1 шт.
3. Комплект для ремонта для M 0002 и M 0003 (клей и две заплаты)
4. Чехол (для модели M 0022)
5. Два запасных баллона (для моделей M 0021 и M 0022)

КОМПРЕССОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ*



Напряжение 220 В/50Гц
Давление 800 Па
Цикл 6 минут
Вес 1,5 кг

* Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид компрессора без ухудшения его основных характеристик

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите все инструкции перед использованием

1. Всегда выключайте матрас (далее изделие) сразу после использования.
2. Не использовать во время принятия ванны.
3. Не кладите или не храните в местах, где изделие может упасть в ванну или раковину.
4. Не помещайте и не роняйте в воду или другую жидкость.
5. Не пытайтесь достать изделие, которое упало в воду. Немедленно выключите из сети.
6. Никогда не оставляйте изделие без присмотра, если оно включено в сеть.
7. Необходимо присматривать за изделием, если оно используется детьми или инвалидами или эти люди находятся в непосредственной близости от изделия.
8. Используйте изделие строго по назначению, как оно описано в инструкции. Не совмещайте его с изделиями, не рекомендованными производителем.
9. Никогда не используйте изделие, если у него поврежден источник питания или вилка, если они не работают в соответствии с инструкцией или их роняли в воду.
10. Храните источник питания вдали от нагреваемых поверхностей.
11. Никогда не закрывайте отверстия для микровентиляции, не помещайте на мягкие поверхности, которые могут их перекрыть, защищайте их от грязи, волос и т.п..
12. Никогда не роняйте матрас и компрессор.
13. Включайте изделие только в тщательно заземленные розетки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

Гарантийный талон

Номер компрессора

Дата продажи

Подпись продавца

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя

М.П.
торгующей
организации