

Инструкция по надеванию и уходу изделий ERGOFORMA:

Надевать изделие следует только в резиновых перчатках, сняв украшения, что обеспечит облегчение надевания и исключит повреждение изделия! При надевании компрессионного **трикотажа 2-го класса** компрессии **рекомендуется** использовать **специальное устройство для надевания**.

1. осторожно собрать изделие от верхней части к носку
2. зафиксировать на стопе носок и пятку изделия
3. аккуратно растянуть изделие от щиколотки до колена
4. убрать складки на голени
5. для чулок и колготок распределить изделие по бедру
6. для изделий «колготки для беременных» надеть верх изделия

Уход: необходима ежедневная ручная стирка при температуре до 40 градусов, полоскание в прохладной воде, сушка вдали от нагревательных приборов в расправленном виде. Не допускается кипятить, отбеливать, гладить, использовать пятновыводители и агрессивные моющие средства. Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

При правильной эксплуатации и ежедневном применении компрессионный трикотаж сохраняет свои лечебные свойства в течение 6 месяцев.

Внимание! Данный компрессионный трикотаж является изделием индивидуального пользования, медицинского назначения, относится к чулочно-носочной группе товаров. Согласно постановлению Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. обмену и возврату не подлежит.