

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простое управление одной кнопкой.
- Функция защиты компрессора от перегрева.
- Взрослая и детская маски в комплекте.
- Стyльный дизайн для хранения и транспортировки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание:

- Ингалятор – это медицинский прибор. Повсевременно с лечащим врачом, чтобы выбрать прибор нужного типа, а также правильно подобрать лекарственный препарат, определить дозу применения и режим ингаляции.
- Применяйте только те лекарственные препараты, в инструкциях которых указано, что их можно использовать в ингаляторах (или) небулайзерах данного типа.
- Запрещается использовать эфирные масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не заливайте в емкость для лекарства препараты, которые не были назначены лечащим врачом.
- Не используйте прибор без жидкости.
- При первом использовании прибора, после длительного перерыва в использовании и после каждого использования очистите все детали прибора, руководствуясь правилами раздела "Чистка прибора".
- Используйте прибор только по прямому назначению – для проведения ингаляционной терапии. Иное использование прибора недопустимо и может быть опасным.
- Не размещайте прибор на мягкой поверхности, где могут оказаться закрытыми рабочие поверхности.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

ЧИСТКА ПРИБОРА

Прибор необходимо чистить до и после каждого использования.

- Выключите прибор и отключите его от сети.
- Щадительно промойте соединительную трубку, респираторные маски, насадку для рта, емкость для лекарства теплой водой и просушите перед использованием или хранением.

Внимание:

- Для очистки бмокты для лекарства, снимите крышку бмокты для лекарства из отбюника и щадительно промойте все части бмокты. Убедитесь, что отверстие в отбюнике не засорено, это может снижать эффективность распыления. Не используйте посторонние предметы при очистке отбюника.
- Прогрейте основной блок мягкой тканью, смоченной водой. Не используйте порошковые или мыльные растворы. Не опускайте прибор в воду.
 - После того, как все детали высохнут, соберите прибор. Если прибор не будет использоваться, уберите его в сухой кейс для хранения и транспортировки.

В случае сильного загрязнения соединительная трубка, респираторные маски, насадка для рта, емкость для лекарства и воздушный фильтр должны быть заменены на новые.

Соединительную трубку, респираторные маски, насадку для рта, емкость для лекарства и воздушный фильтр можно приобрести в сервисном центре Эй энд Ди.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	От сети (220В, 50Гц)
Потребляемая Мощность	– 70 Вт
Скорость распыления	0,2 мл/мин.
Дисперсионный состав аэрозоля	0,5 – 10 мкм
Средний размер частиц аэрозоля	4 мкм
Максимальный объем емкости для лекарства	13 мл
Размеры	188 x 106 x 188 мм
Вес	~1500 г
Условия эксплуатации	10°C – 40°C, влажность менее 95%
Условия хранения	-20°C – 70°C, влажность менее 95%

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте прибор вместе с несортированными бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные сроки установлены в соответствии со статьями 470 и 471 ГК РФ и статьей 19 пункта 2 Закона РФ «о защите прав потребителей».

Ингалятор CN-231 соответствует требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ. Подтверждено Регистрационным удостоверением ФС №2006/529 (20.04.2006 – 20.04.2016).

- Не оставляйте без присмотра включенный прибор.
- Не наклоняйте и не трясите прибор во время использования.
- Не используйте прибор без фильтра.
- Отключайте прибор от электрической сети перед чисткой, заполнением и после каждого использования.
- Прибор не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы самостоятельно. Не разбирайте прибор. Никогда не используйте неисправный прибор, при обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр Эй энд Ди.
- Используйте только те принадлежности к прибору, которые входят в комплект или предлагаются для него отдельно.
- Не допускайте ударов по прибору. Это может привести к его повреждению.
- Основной блок прибора не является влагозащитным. Не допускайте попадания жидкости на основной блок, не погружайте прибор в воду.
- Не прикасайтесь к сетевому шнуру мокрыми руками и не опускайте шнур в воду и другие жидкости.
- Не допускайте попадания лекарственных препаратов на основной блок ингалятора.
- Не используйте прибор вблизи открытых источников газа, кислорода или в местах использования аэрозольных спреев.
- Чтобы исключить сбои в работе прибора, вызванные электромагнитными помехами, создаваемыми другим электронным оборудованием, не используйте прибор вблизи мобильных телефонов или микроволновых печей.
- Храните прибор вдали от воды во избежание электрического удара.
- Храните прибор с открытым воздушным фильтром.
- Не оставляйте прибор без присмотра, храните ингалятор в местах, недоступных для детей.
- Не допускайте самостоятельного использования прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями.

СМЕНА ФИЛЬТРА

- Удалите использованный фильтр из компрессора, вынув крышку фильтра.
- Вставьте новый фильтр.

Внимание:

- Не используйте хлопковые или иные материалы в качестве фильтра для прибора.
- Не мойте и не чистите фильтр.
- Меняйте фильтр по необходимости, если цвет фильтра становится серым.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Храните прибор при комнатной температуре и оберегайте его от загрязнения, резкого перепада температур, повышенной влажности, ударов и пыли. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Храните прибор вдали от воды во избежание электрического удара. Не допускайте попадания воды на поверхность корпуса.
- Не храните и не переносите ингалятор, содержащий лекарственные препараты.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор отключенным от сети.

Гарантийный срок основного блока – 5 лет. На другие комплектующие – респираторная маска для взрослых, респираторная маска для детей, соединительная трубка, емкость для лекарства, насадка для рта, воздушный фильтр, кейс для хранения и переноски – гарантийный срок не устанавливается.

Установленный производителем в соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «о защите прав потребителей» срок службы (срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению) прибора равен 10 годам при условии, что прибор используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Серийные номера приборов компании Эй энд Ди включают в себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN B1203 00193, где информационные являются выделенные цифры 1203: 12 – год производства, 03 – месяц производства.

Разработано A&D Company Ltd., Япония

Производитель: A&D Company, Limited

Эй энд Ди Компани, Лимитед

Юридический адрес: 1-243 Асии, Китамо-ши, Сайтама, 308-0072 Япония

1-243, Асии, Китамо-ши, Сайтама, 308-0072, Япония

Фактический адрес: 3-23-14, Higashis-кебукю, Тотиги-ку, Тотиги, 321-0013, Япония

Производственное подразделение: AMD Electronics (Shenzhen) Co., Ltd, Bafianyang Industrial Zone, Tanlou Village, Songgang Town, Baan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Эй энд Ди Электроник (Шэньчжэнь) Компани, LTD, Датинъян Индустрис зон, Танлу

Вилладж, Санланг Тон, Баан Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандунг провинция, Китай

Импортер: ООО «Эй энд Ди РИС», 121357, Москва, ул. Бережная, д. 17,

Телефон: 8 800 200 03 80

AND
Эй энд Ди, Япония

Ингалятор компрессорный

Модель CN-231

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Японская компания A&D (Эй энд Ди) благодарит Вас за покупку компрессорного ингалятора, созданного на основе самых передовых технологий.

Мы уверены, что, оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ.

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

- При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний дыхательных путей.



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Насадка для рта – 5 шт.



Воздушный фильтр – 5 шт.




Кейс для хранения и переноски – 1 шт.



Руководство по эксплуатации (на русском языке) и гарантинная карта – 1 шт.

СБОРКА ПРИБОРА

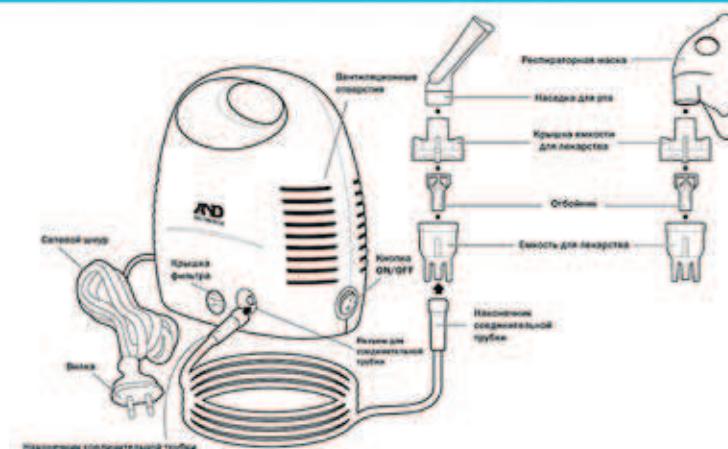

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием или после длительного хранения очистите прибор в соответствии с правилами раздела «Чистка прибора».

1. Убедитесь, что прибор выключен (положение «0» кнопки ON/OFF).

2. Снимите верхнюю крышку емкости для лекарства, аккуратно повернув ее против часовой стрелки.



3. Заполните нижнюю часть емкости назначенным врачом лекарственным препаратом (рис. 1).



4. Установите крышку емкости для лекарства на место и закройте ее, аккуратно повернув по часовой стрелке.



1

5. Поместите один конец соединительной трубы в разъем на ингаляторе, находящийся в нижней части прибора, и установите ингалятор на столе (рис. 2).

6. Другой конец соединительной трубы подсоедините к емкости для лекарства (рис. 3).



2



3

7. Затем подсоедините насадку для рта или респираторную маску к верхней непрозрачной части емкости для лекарства (рис. 4-5).

8. Включите вилку сетевого шнура в розетку.
• Кнопка ON/OFF должна быть выключена.



4



5

Внимание

- Не используйте какие-либо лекарства без предварительной консультации с лечащим врачом. При несоблюдении указанной врачом дозировки и способе применения они могут быть опасны для здоровья.
- Соблюдайте правила приготовления раствора для ингаляции, изложенные в инструкции к лекарственному препарату.
- Обратите внимание, что некоторые растворы могут плохо распыляться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Внимание

- Перед началом эксплуатации прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Не допускайте попадания аэрозоля в глаза.
- Детям следует пользоваться прибором под присмотром взрослых.

1. Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF (положение «1» кнопки ON/OFF).

После включения кнопка ON/OFF будет светиться. Аэрозоль будет выходить через насадку для рта или респираторную маску.



6

Внимание

- Не закрывайте вентиляционные отверстия компрессора.
- Не допускайте сильного наклона емкости для лекарства при проведении ингаляции.

2. Возьмите насадку в рот и вдыхайте аэрозоль через рот (рис. 6). Дыхание должно быть ровное.

Для проведения ингаляции сразу на все участки верхних дыхательных путей используйте респираторные маски для взрослых и детей (рис. 7-8).

- 3. Для окончания ингаляции нажмите кнопку ON/OFF.
- 4. Отсоедините сетевой шнур от сети переменного тока.



7

Внимание

Мотор компрессора имеет функцию температурной защиты, которая способствует автоматическому отключению прибора в том случае, если ингалятор начинает перегреваться.

Если прибор отключился:

1. Выключите прибор, нажав кнопку ON/OFF.
2. Отключите прибор от сети переменного тока.
3. Необходимо дать прибору остыть в течение 30 минут после автоматического отключения.



8

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Действия
Прибор не включается	Убедитесь, что сетевой кабель правильно подключен к сети переменного тока
Лекарственный препарат не распыляется или распыляется в недостаточном количестве	Убедитесь, что в емкости для лекарства находится достаточное количество раствора
	Убедитесь, что прибор и комплектующие чистые, без загрязнений

Внимание

Если перечисленные действия не устранили проблему, обратитесь в ближайший сервисный центр Эй энд Ди.