

Сведения о сертификации

Кресло-коляска для инвалидов Н 001 соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2011/11294 действительно от 28.12.2011 г. Срок действия: не ограничен

Изготовитель: «Jinagsu Yuuye Medical Equipment and Supply Co., Ltd»,

Джиангсу ЮЮ Медикал Эквипмент энд Саплай Ко., Лтд , Китай

Danyang, Jiangsu, 212310, China

Дистрибьютор: ТМ «Армед»

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов Н 001 –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru



Кресло-коляска для инвалидов

Модель Н 001

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска для инвалидов Н 001 предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Кресло-коляска для инвалидов Н 001 предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

При соблюдении целевого назначения, требований безопасности и технических характеристик при использовании кресла-коляски какой-либо риск отсутствует.

1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:


- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски Н 001 противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

3. Описание кресла-коляски Н 001

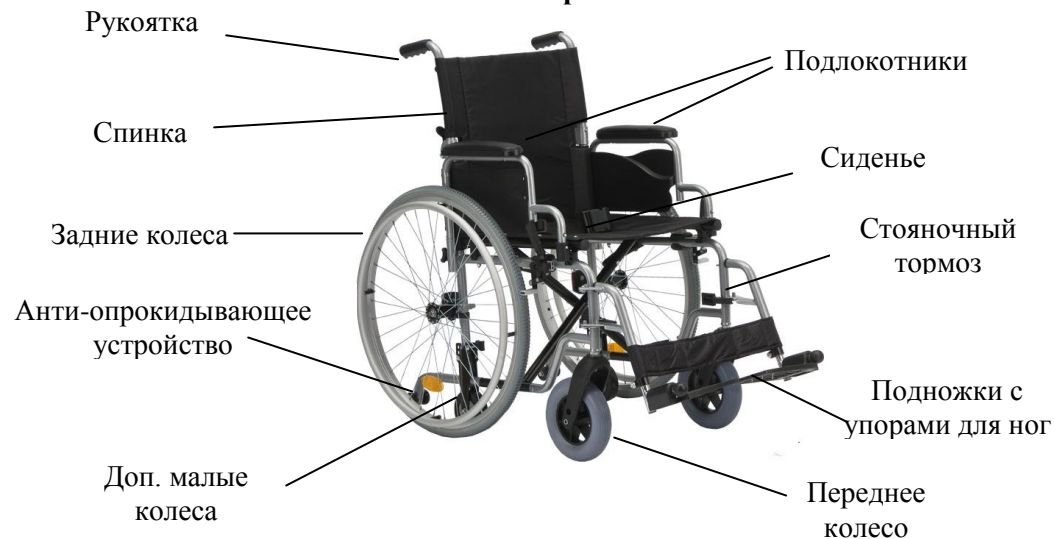

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Перед использованием необходима тренировка при сопровождающем лице на ровной площадке с хорошим обзором.
- Ознакомьтесь с режимами разгона, поворота и торможения;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- При посадке и высадке с кресла-коляски Н 001 колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10° имеется опасность опрокидывания назад;
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед;
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами;
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

4. Эксплуатация

Посадка и высадка пациента

- Посадка и высадка спереди:

1. Поставьте кресло на стояночный тормоз.
2. Сложите вверх опоры для стоп и откинуть подножки наружу.
3. Расположите инвалидную коляску максимально близко фронтальными сторонами к месту, куда будет пересаживаться пациент.
4. Соскользните путем поворота тела на сиденье.
5. Откиньте подножки в середину, опустите опоры стоп и поставьте на них ноги.
6. Пристегните ремень безопасности

- Посадка и высадка с боковой стороны

1. Расположите инвалидную коляску сиденье, с которого будет проводиться пересадка, максимально близко боковыми сторонами друг к другу.
2. Поставьте кресло на стояночный тормоз.
3. Откинуть подлокотники.
4. Сложить обе опоры для стоп вверх.
5. Соскользните боком на сиденье.
6. Сядьте на сиденье максимально глубоко

7. Разместить подлокотники и подножки в исходное положение.

8. Пристегните ремень безопасности.

Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска Н001 складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски Н001 следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх. (Рис.1)

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме. (Рис.2)

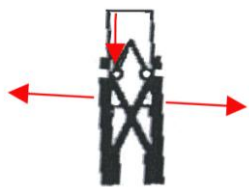


Рис.1

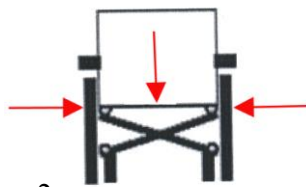


Рис.2

Опоры для ног:

Кресло-коляска Н001 комплектуется съемными и поворотными ножными опорами. (Рис.3)



Рис.3

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины подножек производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

Длину подножек можно подогнать под длину Ваших ног (рис. 4):

1. Ослабьте винт на трубе подножки и вытащите его.



Рис.4

2. Установите внутреннюю трубу в требуемое положение.

3. Вставьте винт, чтобы он прошел сквозь внешнюю и внутреннюю трубы, и затяните его

Тормоза:

Кресло-коляска Н001 снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза (рис. 5). Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования. Рукоятки можно убрать, сдвинув вверх и согнув кзади. Стояночный тормоз нельзя использовать при движении, только для стоянки.



Рис. 5

Колеса:

Кресло-коляска комплектуется колесами с шинами из вспененного полиуретана. Задние колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией. Нажав на кнопку в центре колеса, оно легко снимается, вместе с направляющим стержнем. (рис.6)



Рис. 6

Антипрокидывающее устройство:

Кресло-коляска для инвалидов Н 001 комплектуется съемными антипрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации, оснащенными парными роликовыми колесами. При снятых ведущих колесах кресло можно перемещать, используя передние и дополнительные роликовые колеса рис.7



Рис. 7

Подлокотники:

Подлокотники ступенчатые, съемные. Для снятия подлокотника нажать кнопку фиксатора (рис. 8), расположенную на подлокотнике спереди и вынуть подлокотник из пазов.



Рис. 8

Дополнительные малые колеса:

Кресло-коляска для инвалидов Н001 комплектуется дополнительными малыми колесами (рис.9)

Дополнительные малые колеса можно регулировать по высоте, для этого открутите барашек – фиксатор и переставьте в другое отверстие выше или ниже.



Рис.9

Ремень безопасности:

Кресло-коляска оснащено ремнем безопасности, который крепится по бокам основания сиденья, регулируется по длине и имеет надежную застежку (рис.10).



Рис.10

Рама:

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава и имеют эмалевые лакокрасочные покрытия.

Приведение в движение и торможение:

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску Н001 в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток. Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

При самостоятельной езде - кресло-коляска Н001 приводится в движение и затормаживается с помощью обручей, закрепленных на больших колесах.

Транспортировка:

Для экономии места при транспортировке, спинка кресла-коляски Н001 складывается пополам (рис.11), задние колеса быстросъемные (рис. 12), что позволяет их быстро снять с рамы, кресло-коляска для инвалидов Н001 удобно складывается и занимает мало места (рис.13). Нельзя использовать кресло-коляску Н001 в качестве сиденья в автомобиле.



Рис.11



Рис. 12



Рис. 13

Рекомендации по уходу:

При эксплуатации кресло-коляска Н001 требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

5. Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Длина в рабочем состоянии, мм | 1045 |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 660 |
| Высота, мм | 923 |
| Ширина сиденья, мм | 460 |
| Глубина сиденья, мм | 430 |
| Высота спинки, мм | 413 |
| Высота подлокотников, мм | 220 |
| Ширина подлокотников, мм | 50 |
| Длина подлокотников, мм | 240 |
| Вес нетто, кг | 16,8 |
| Грузоподъемность, кг | 110 |
| Диаметр задних колес, мм | 600 |
| Диаметр передних колес, мм | 200 |