

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Массажер безопасен и прост в использовании
- Обеспечивает безболезненный массаж
- Массажер МН-102 рекомендовано использовать при наличии следующих симптомов:
 - Боли в спине и затекшие плечи
 - Мышечные боли (в частности, после родов и физических упражнений)
 - Нарушение работы пищеварительного тракта
 - Жировые отложения на проблемных местах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------|---|
| Источник питания | От сети переменного тока 220 В (50Гц) |
| Мощность | 15 Вт |
| Скорость вибрации | Режим «I»: 3400 ± 34 уд./мин. Режим «II»: 6000 ± 60 уд./мин. |
| Вес | 1400 г |
| Размеры | 135 x 380 x 145 мм |

ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед чисткой массажера отключите прибор от сети.
- Протирайте корпус чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства, (мыльный раствор).

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать. Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Волны инфракрасного излучения являются естественными и безопасными для человека. Благодаря точно сконструированному излучателю, эти волны проникают в тело человека, передавая организму тепловую энергию. Проникновение инфракрасных волн в тело прогревает ткани, мышцы и суставы, ускоряет циркуляцию крови. Излучаемое лампой тепло усиливает благотворное воздействие массажа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы* прибора равен 5 годам при условии, что прибор используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год.

Серийные номера приборов компании Ай Си Эс Ти включают в себя дату изготовления прибора.

Серийные номера имеют следующий вид: SN E 080303044, где информативными являются выделенные цифры 0803:

08 – год производства, 03 – месяц производства.

* Срок службы – срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.

Адрес изготовителя:

ICST Corporation, 2-9-16 Moto-Cho, Urawa-ku, Saitama-City 330-0073, Japan
Factory in China: «Tytan Medical Corp. Shanghai», No. 785, Cheng-Feng Rd., Chuansha, Pudong, Shanghai, China
«Ай Си Эс Ти Корпорейшн», 2-9-16 Мото-Шо, Урава-ку, Сайтама-Сити 330-0073, Япония
Завод в Китае: «Титан Медикал Корп. Шанхай», № 785, Ченг-Фенг Рд., Чанша, Пудонг, Шанхай, Китай

Фирма-импортер:

ООО «Эй энд Ди Рус», 121357, Москва, ул. Верейская, 112 квартал Кунцево
Тел.: 8 800-200-03-80; отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

МАССАЖЕР

Модель МН-102



NOZOMI
Tokyo, JAPAN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Японская компания ICST (Ай Си Эс Ти) благодарит Вас за покупку массажера для тела, созданного на основе самых передовых технологий. Мы уверены, что, оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции. Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для проведения массажа тела с использованием инфракрасного излучения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА

Массажер – 1 шт.



Функциональный переключатель

Лампа инфракрасного излучения

Массажная поверхность

Гарантийная карта – 1 шт.

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, гарантийный талон и, если возможно, упаковку.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
- Не помещайте прибор в воду.
- Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в доме соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Отключайте массажер от сети, если вы не пользуетесь им, а также перед чисткой. Отключайте прибор от сети только сухими руками.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.

ВНИМАНИЕ

- Перед началом эксплуатации прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Массажер не предназначен для проведения массажа головы.
- Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем обратитесь к врачу.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у Вас имеются повреждения или воспаления кожных покровов.
- Не используйте лампу инфракрасного излучения, если у Вас чувствительная кожа, заболевания вен, опухоли, воспаление или сыпь на коже ног.
- Не используйте лампу инфракрасного излучения более 15 минут.
- Прибор имеет горячую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при обращении с прибором.

ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

При включении и отключении прибора от сети не касайтесь вилки мокрыми руками!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Установите переключатель в положение «0» и подключите прибор к сети.
2. Выберите нужный режим и установите функциональный переключатель в положение «I» или «II».
 - Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног и спины.
 - Продолжительность массажа не должна превышать 4 мин. для отдельной части тела и 15 мин. в общем. Повторное использование прибора возможно только через 10 мин.
 - Используйте прибор не менее, чем через час после принятия пищи.
4. По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение «0».
5. Отключите прибор от сети.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Массаж шеи, плечевого пояса и рук



Массаж ног и ступней



Массаж спины, бедер и абдоминальной области

