

ВНИМАНИЕ

- Перед началом эксплуатации прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем обратитесь к врачу.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если на кожных покровах имеются воспаления или повреждения кожных покровов.

ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

При включении и отключении прибора от сети не касайтесь вилки мокрыми руками!

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Массажер безопасен и прост в использовании
- Высокая интенсивность массажа: до 12 000 ударов в минуту
- Безболезненный массаж в различных направлениях
- Массажер МН-103 рекомендовано использовать при наличии следующих симптомов:
 - Боли в спине и затекшие плечи
 - Мышечные боли (в частности, после родов и физических упражнений)
 - Хроническая усталость
 - Нарушение работы пищеварительного тракта
 - Жировые отложения на проблемных местах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	От сети переменного тока 220 В (50Гц)
Мощность	15 Вт
Скорость вибрации	Режим «I»: 9000 ± 900 уд./мин.
	Режим «II»: 12000 ± 1000 уд./мин.
Вес	1700 г
Размеры	145 x 420 x 150 мм

ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед чисткой массажера отключите прибор от сети.
- Протирайте корпус чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства, мыльного раствора и т. д.

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать. Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы* прибора равен 5 годам при условии, что прибор используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год.

Серийные номера приборов компании Ай Си Эс Ти включают в себя дату изготовления прибора.

Серийные номера имеют следующий вид: SN 0803 03044, где информативными являются выделенные цифры 0803:

08 – год производства, 03 – месяц производства.

*Срок службы – срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.

Адрес изготовителя:

ICST Corporation, 2-9-16 Moto-Cho, Urawa-ku, Saitama-City 330-0073, Japan
Ай Си Эс Ти Корпорейшн, 2-9-16 Мото-Шо, Урава-ку, Сайтама-Сити 330-0073, Япония
Factory in China: Tiyun Medical Corp, Shanghai, No. 785, Cheng-Feng Rd., Chuansha, Pudong, Shanghai, China
Завод в Китае: Титан Медикал Корп. Шанхай, № 785, Чэнг-Фенг Рд., Чанша, Пудонг, Шанхай, Китай

Фирма-импортер:

ООО «Эй энд Ди Рус», 121357, Москва, ул. Верейская, 112 квартал Кунцево
Тел.: 8 800-200-03-80; отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

МАССАЖЕР

Модель МН-103



NOZOMI
Tokyo, JAPAN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Японская компания ICST (Ай Си Эс Ти) благодарит Вас за покупку массажера для тела, созданного на основе самых передовых технологий. Мы уверены, что, оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции. Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для проведения массажа тела с использованием ионного излучения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА



MI ICSTMH103 0308

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, гарантийный талон и, если возможно, упаковку.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
- Не помещайте прибор в воду.
- Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в доме соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Отключайте массажер от сети, если вы не пользуетесь им, а также перед чисткой. Отключайте прибор от сети только сухими руками.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Массажер МН-103 оборудован лампой ионного излучения. Отрицательно заряженные ионы, которые еще называют «воздушными витаминами», известны своим благотворным влиянием на организм. Они придают силы и бодрость человеку, ускоряют метаболические процессы в организме, замедляют процесс старения.

Переутомление, эмоциональный стресс ослабляют иммунную систему человека и могут стать причиной различных тяжелых заболеваний (язва, гипертония, онкологические болезни) и перерасти в состояние тяжелой депрессии. Массажер поможет снять ежедневные стресс и усталость.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


1. Установите переключатель в положение «**0**» и подключите прибор к сети.
2. Выберите нужный режим и установите функциональный переключатель в положение «**I**» или «**II**».
3. При необходимости ионного излучения установите переключатель ионного излучения в положение «**On**».



- Если Вы используете прибор больше 10 мин., установите переключатель ионного излучения в положение «**Off**».
- Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног и спины.
- Продолжительность массажа не должна превышать 10 мин. Повторное использование прибора возможно через 10 мин.
- 4. По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение «**0**».
- 5. Отключите прибор от сети.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Массаж шеи, плечевого пояса и рук

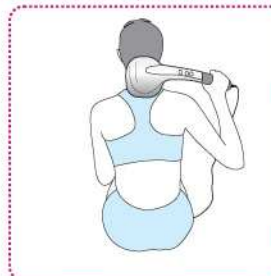

Массаж ног и ступней



Массаж спины, бедер и абдоминальной области

