

## **Уважаемый покупатель!**

Спасибо за доверие продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения.

### **Бандаж дородовой БД - «ТРИВЕС»**

#### **Модели: Т-1118, Т-1119**

#### **Описание Т-1118:**

- изготовлен из воздухо- и влагопроницаемого материала с высоким содержанием хлопка, не вызывает аллергии и раздражения кожи;
- снабжен прочной, износостойкой застежкой Велкро под животом с увеличенной площадью контакта и дополнительной стяжкой для оптимального размещения бандажа;
- удобная система крепления позволяет индивидуально регулировать степень фиксации;
- два пластиковых ребра жесткости снижают избыточную нагрузку на поясничный отдел позвоночника и препятствуют скручиванию бандажа;
- анатомическая конструкция бандажа с вырезом по линии бедер позволяет надежно поддерживать живот, не ограничивая движения и ходьбу;
- бандаж не заметен под одеждой, комфортен при носке в любое время года.

#### **Описание Т-1119:**

- изготовлен из воздухо- и влагопроницаемого материала с содержанием хлопка – 51%, не вызывает аллергии и раздражения кожи;
- снабжен прочной, износостойкой застежкой «Велкро» под животом с увеличенной площадью контакта для оптимального размещения бандажа;
- дополнительная двойная стяжка позволяет индивидуально регулировать степень фиксации;
- два пластиковых ребра жесткости снижают избыточную нагрузку на поясничный отдел позвоночника и препятствуют скручиванию бандажа;
- анатомическая конструкция бандажа с вырезом по линии бедер позволяет надежно поддерживать живот, не ограничивая движения и ходьбу;
- бандаж не заметен под одеждой, комфортен при носке в любое время года.

#### **Принцип действия:**

- эластичная поддержка живота;
- стабилизация положения внутренних органов и матки;
- обеспечивает нормальное положение плода;
- предохраняет кожу живота от чрезмерного растяжения;
- снижает нагрузку на пояснично-крестцовый отдел позвоночника;
- обеспечивает комфортные движения и ходьбу.

#### **Показания к применению:**

- нормально протекающая беременность с 20-24 недели;
- многоплодие, многоводие и гипертонус матки во время беременности.

#### Инструкция по применению:

- надеть бандаж на нижнее белье, лежа на спине;
- ребра жесткости должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба;
- зафиксировать застежку бандажа под животом;
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки;
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом, но не должна превышать 8 часов.

**При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

#### Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30 С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не тереть и не выжимать изделие;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Если в период использования бандажа появилась боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите бандаж и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Применять изделие под контролем врача.**

Состав:

T-1118: полиамид-54%, хлопок-20%, эластан-16%, полиэстер-10%, ребра - пластик;  
T-1119: хлопок - 51%, эластан - 27%, полиэстер - 22%, ребра - пластик.

/ 9396-003-85557773-2008  
/ № ФСР 2008/03752 от 12.12.2008 г.



#### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок службы с начала эксплуатации не менее 1 года, срок хранения 5 лет.  
Производитель: ООО «Торговый дом «ТРИВЕС СПБ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская д. 4/1, тел./факс: (812) 329-72-97.  
<http://www.trives-spb.ru>, [info@trives-spb.ru](mailto:info@trives-spb.ru)

Дата выпуска  
Штамп ОТК

ЯНВ 2013

Дата продажи  
Штамп торг.  
организации